


Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling	Styret dokument <b>P-Hepatitis A virus antistof (IgM) (HAV-antistof) Datablad</b>					Niveau: <b>Datablad</b>	
	Dokumentbrugere: <b>LAB</b>	Redaktør: <b>SN</b>	Dokumentansvarlig: <b>Red 2</b>	Dokumentnummer: <b>DAT 12. 1. 8.9</b>	KBA nummer:	Version: <b>2.2</b>	
							<b>11.04.2011</b>

<b>NPU</b>	NPU12181 P—Hepatitis A virus-antistof(IgM); arb.k.(0 1) =?
<b>Indikation</b>	Formodning om hepatitis A virusinfektion. Bestemmelse af immunstatus.
<b>Udførelse og svartider</b>	Rutine Svar samme dag eller næste hverdag
<b>Patientforberedelse</b>	Ingen
<b>Prøvemateriale</b>	Heparinplasma
<b>Holdbarhed og forsendelse</b>	Fuldblod i tilproppet glas ucentrifugeret/centrifugeret er holdbar ved rumtemperatur i 3 døgn og ved 2 - 8 °C i 7 døgn. Plasma kan fryses Tåler forsendelse (max. 3 døgn)
<b>Referenceinterval</b>	0
<b>Ringegrænse</b>	Ingen
<b>Apparatur</b>	Abbott, Architect i2000SR
<b>Analyseprincip</b>	Chemiluminescens mikropartikel immunoassay (CMIA)
<b>Måleinterval</b>	0 1
<b>Sporbarhed</b>	Kalibratoren er recalcificeret humant plasma reaktiv for anti-HAV af IgM klassen og er sporbar til intern referencestandard fremstillet af Abbott
<b>Korrekthed</b>	Se Abbott pakningsindlæg og Ekstern kvalitetskontrol
<b>Intermediær præcision</b>	CV ca. 6% i det reaktive område. I det nonreaktive område er CV 10-15%
<b>Specificitet/ Interferens</b>	Diagnostisk specificitet = >99,0%, diagnostisk sensitivitet 95-98% Hæmolyse (Hemoglobin) < 310µmol/l, Bilirubin <342 µmol/l samt Triglycerid < 34 mmol/l interferer ikke på signalet.
<b>Måleusikkerhed</b>	
<b>Intern kvalitetskontrol</b>	Abbott Architect kontrol negativ og positiv for HAV antistof IgM
<b>Ekstern kvalitetskontrol</b>	Labquality Hepatitis A virus FIN
<b>Andre forhold</b>	Ved rekvirering af HAV antistof udgives svar på IgM og IgG antistof
<b>Valideret</b>	01.03.2007
<b>Akkrediteret</b>	 EXAM Reg. nr. 1509

**Ændringsblad**

<b>Dato</b>		<b>Initialer</b>
09.04.2011	Interferens opdateret overfor pakningsindlæg	SN

---

**Styrede dokumentudskrifter:**

1 - Sektion 2