

Påsætning af sensor med SENS plaster

- Plastret bæres diskret på låret, **24 timer i døgnet**. Det er kompakt, vandtæt og fleksibelt. **Eet plaster kan bæres i max. de 10 dage målingen i INTER99 varer.**
- Først skal sensor og plaster samles, hvorefter det monteres på forsøgsdeltagerens **HØJRE** ben, ca. 10 cm over knæskallen på lårets yderside.

1



Placér sensoren inde i plasterlommen med SENS motion logoet opad

2



Træk det nederste stykke folie/plastik af, så sensor og plaster kan trykkes fast

3



Fastgør plasteret grundigt rundt om sensoren

Det er vigtigt at få sat plasteret rigtigt på, så sensoren virker korrekt. Læs og følg instruktionerne på næste side.

VIGTIGT:

Plasteret skal placeres på **YDERSIDEN** af låret over forsøgsdeltagerens knæ. Den runde del af sensoren skal vende **NED** mod gulvet og den øverste del skal have retning **MOD** hoften. Se hvordan det skal sidde på billedet til højre.



1



Fjern bagsiden

2



Fjern den hvide kant

3

Sæt plasteret på
siden af låret

Om at bære SENS Motion: Nu gives generel information om, at deltageren kan gøre alt med måleren på. Man kan bade, sove, træne etc. Hvis målerne skulle falde af, eller deltageren synes, plasteret skal skiftes, så har de fået en pose udleveret med ekstra klister og tape. Det er dog bedst at lade dem sidde.